


## Trä enkelt över AquaProtect – utan krångel med tejp eller gummiband.



Om underlaget är skrovligt, kan man dra på en strumpa eller liknande för att förhindra rispor. Täck öppna sår.

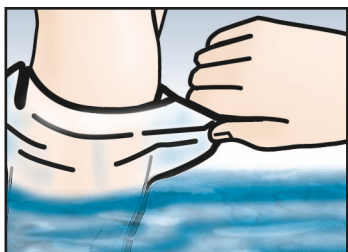

AquaProtect är mycket tånjbart - dra bara över och dra uppåt så långt som möjligt. Dra tillbaka tätningsläppen något för att få den ligga an tätt mot muskelområdet.



Om materialet ligger an för tätt eller rullar upp sig i ändarna kan man dra kraftigt i öppningen några gånger för att anpassa spänningen. Vid bad doppa först ned armen/benet försiktigt. Dra i hörnet för att släppa ut överskottsluft och släpp tillbaka

tätningsläppen. Att tänka på: Trots att sulan är halksäker bör man röra sig försiktigt i våtutrymmen. Bada inte alltför länge (lufttätt avslut, kondensvatten).

# AquaProtect®

AquaProtect	Modell	Längd ±	Omfång
Halv arm, large	AP 21	54 cm	≥ 22 cm
Halv arm, small	AP 17	43 cm	≥ 17 cm
Hel arm, large	AP 31	80 cm	≥ 26 cm
Hel arm, small	AP 26	66 cm	≥ 19 cm
Halvt ben, large	LP 25	64 cm	≥ 32 cm
Halvt ben, small	LP 20	51 cm	≥ 24 cm
Helt ben, large	LP 44	112 cm	≥ 47 cm
Helt ben, small	LP 33	84 cm	≥ 31 cm



EIR MEDIC

Hedeforsvägen 9 • 44361 Stenkullen  
Tel. 0302-17330 • Fax 0302-17340  
www.eirmedic.se • info@eirmedic.se

 PRAMETA

Genker Strasse 16 • D-53842 Troisdorf  
Tel. +49(0)2241.23996-0 • Fax +49(0)2241.23996-33  
info@praemeta.de • www.praemeta.de

11/09 • Rätt till tekniska ändringar förbehålls. Vi reserverar oss för tryckfel och felaktigheter.



Var du än är:  
I duschen, badet,  
poolen eller havet  
AquaProtect skyddar  
ditt bandage!

# AquaProtect®

# AquaProtect®

## Var du än är: I duschen, badet, poolen eller havet AquaProtect skyddar ditt bandage!



Modeller för halv  
och hel arm

AquaProtect gör ditt liv med gips så mycket enklare och bekvämare.

En dusch eller ett avkopplande bad, diska för hand eller att tvätta golv - nu är det fullt möjligt.

Sätt AquaProtect över bandaget/gipset och du har ett 100 % vattentätt skydd.



Modeller för halvt  
och helt ben

AquaProtect är ett skydd gjort av det hudvänliga materialet polyuretan.

Det finns fyra olika modeller: två storlekar av varje (stora och små) för halv arm, hel arm, halvt ben och helt ben. Benmodellerna har halksäkra sulor för att ge skydd och säkerhet på hala golv.

AquaProtect är latexfritt och är mycket flexibelt, allergitestat och hudvänligt.

AquaProtect är ett mycket robust skydd som kan användas många gånger om.

Köp ditt AquaProtect genom oss på Eir Medic.

# AquaProtect®



Alla modeller i stora  
och små storlekar.

AquaProtect skyddar ditt bandage/gips, var du än är:  
I duschen, badet, poolen eller havet.

AquaProtect håller ditt bandage/gips torrt.



Även för  
vattensporter